



healthfactories
power therapy engineering



equitron PRO
High Energy Cell Treatment



Healthfactories Italia
Via Melchiorre Gioia, 168 – 20125 Milano
Tel. [+39 02 40031427](tel:+390240031427) E-MAIL info@healthfactories.it P.IVA 05020280268



Sommario

1. Caro utente di EQUITRON	2
1.1 Indicazioni	2
2. Prima dell'uso	3
2.1 Normative sulla sicurezza	3
2.2 Controindicazioni	4
3. Diagnosi con EQUITRON	4
4. Raccomandazioni sull'utilizzo - Linee guida	5
4.1 Aumento dell'intensità	5
4.2 Effetti collaterali e effetti indesiderati	5
4.3 Prevenzione	6
5. La regolazione del ciclo di trattamento	6
6. Indicazioni Terapeutiche	7
7. Esempi di battitura	9
7.1 Tendine flessore profondo 1	9
7.2 Tendine flessore profondo 2	9
7.3 Tendine flessorio superficiale	10
7.4 Borsite del Carpale	10
7.5 Articolazione dello zoccolo	11
7.6 Legamento congiunto	11
7.7 Articolazione del ginocchio	11
7.8 Garretto.....	11
7.9 Articolazione temporo mandibolare	11
7.10 Dorso cervicale	11
7.11 Giunto sacroiliaco	11

1. Caro utente di EQUITRON

Questa guida dell'utente fornisce istruzioni per l'uso di EQUITRON nella pratica quotidiana.

Le raccomandazioni menzionate nelle pagine seguenti sono basate sia sul piano degli studi scientifici sull'uso della stimolazione magnetica periferica ripetitiva (rPMS) con il dispositivo EQUITRON e su anni di esperienza quotidiana e su conoscenze generali basate sull'evidenza dall'intero campo del trattamento elettrico.

1.1 Indicazioni

- Queste linee guida sono di natura consultiva e di conseguenza non sono linee guida rigorose.
- La percezione effettiva del cavallo rispetto alle impostazioni di intensità e la rispettiva durata del trattamento è sempre la priorità - anche se le impostazioni lo sono contrariamente alle linee guida, perché ogni cavallo reagisce in modo diverso rispetto al dispositivo applicazione a seconda delle sue condizioni, della storia della malattia e del suo individuo costituzione.
- Osservare tutte le istruzioni tecniche quando si utilizza EQUITRON

2. Prima dell'uso

2.1 Norme di sicurezza

Assicurarsi che l'utente tenga:

- Carte di credito –
- Chiavi dell'auto elettronica –
- Telefoni cellulari
- Gioielli
- Orologi

ad almeno 5 metri di distanza dal dispositivo EQUITRON.



2.2 Controindicazioni

Verificare anche in anticipo che l'utente

- non abbia un pacemaker o altri impianti elettromagnetici sensibili
- non abbia impianti metallici a terminazione anulare
- non sia in stato di gravidanza

3 Diagnosi con EQUITRON

EQUITRON diagnostica dolore ed infiammazioni dove la medina convenzionale non riesce.

Impostare EquiTron su un'intensità del 90% e ad una distanza dal cavallo di ca. 5 cm portare il cavo di trattamento lungo tutto il corpo. Attraverso una sensazione pungente, tirante o nevralgica, il cavallo indicherà infiammazione, degenerazione o lesioni cercando di evitare il dispositivo. Se il cavallo reagisce in questo modo, rimuovere immediatamente il cavo da questa posizione.

A questo punto inizierai a usare la sua bassa intensità nel punto di reazione e aumenterai l'intensità finché non vedrai un'altra reazione difensiva da parte del cavallo.

L'intensità viene quindi abbassata di ca. 8% e quindi può essere utilizzato. L'intensità dovrebbe essere sempre impostata in modo tale che il cavallo la percepisca come rilassante e confortevole. Meno è meglio.

A causa dei limiti di tempo, raccomandiamo innanzitutto di determinare i punti e le loro impostazioni ideali e di annotarli in un record di trattamento o nel software

4. Consigli d'uso - Linee guida

Il seguente elenco offre una panoramica generale sull'uso di EQUITRON.

Le indicazioni sono elencate in ordine alfabetico e non per argomento.

Posizionare il cavo di trattamento direttamente sull'area o sull'organo da trattare. L'utente può se necessario attaccare il cavo durante il trattamento a una coperta di protezione che deve essere acquistata separatamente.

Per l'uso nell'area della testa (ad esempio l'artrite dell'ATM) utilizzare sempre un'intensità molto bassa (20- 40%).

Le raccomandazioni riguardanti l'intensità e la durata sono solo linee guida ma ciò che è importante è la percezione soggettiva del cavallo, cioè l'uso non dovrebbe mai essere spiacevole o doloroso. In quest'ultimo caso ridurre l'intensità ed aumentare il numero di trattamenti.

4.1 Aumentare l'intensità

Con l'uso successivo ricominciare con la stessa intensità di prima. Dopo 1-2 i minuti cercare di aumentare l'intensità. Se il cavallo è senza dolore all'impostazione più alta continuare con esso e la prossima volta iniziare di nuovo con questa impostazione.

4.2 Effetti collaterali e effetti indesiderati

Ad oggi non ci sono effetti collaterali noti.

La maggior parte degli utenti afferma che un aumento del benessere del cavallo è un effetto collaterale.

Se l'intensità utilizzata è troppo alta (oltre la soglia del dolore) inizialmente potrebbe manifestarsi irritazioni che diminuiscono entro 2-3 giorni.



4.3 Prevenzione

L'utilizzo di Equitron come prevenzione è ancora sottostimato.

Si raccomanda comunque di curare ferite vecchie o guarite con punti 1 volta al mese.

5. La regolazione del ciclo di trattamento

Posizionare il cavo di trattamento direttamente sull'area o sull'organo da trattare.

Generalmente, trattate sempre al di sotto del livello del dolore.





6. Indicazioni

Atassia	70-80%	10 min.	Locale
Artrite	80-90%	10 min	Locale

Borsite	70-90%	10 min	Locale
---------	--------	--------	--------

Infiammazione agli occhi	30-40%	10 min	Locale
Adesioni fasciali	80-90%	10 min	Ogni giorno
Ferite/crepe	80-90%	10 min	Locale
Infiammazioni articolari	80-90%	10 min	Locale
Articolazione del ginocchio	80-90	15 min	Locale
Kissing spine	60-70%	15 min	Locale
Laminite	80-90%	10 min	Locale giornaliero
Lesioni dei legamenti	80-90%	10 min	Locale
Tensione muscolare	70-80%	15 min	Muscoli ed appendici
Ceppi muscolari	80-90%	15 min	Locale e appendici
Legamenti nicali	80-90%	15 min	Locale
Disturbi neurologici	80-90%	15 min	Spina dorsale ed estremità
Osteoartriti	80-90%	10 min	Locale
Philemon's	80-90%	10 min	5 min a rene
Podothrochlea	80-90%	10 min	Locale giornaliero
Malattie respiratorie	70-90%	10 min	A polmone
Sarcoide	80-90%	10 min	Locale
Zoppia Spat	70-90%	10 min	Locale
Fratture ossee	80-90%	10 min	Locale
Legamento sospensore	80-90%	10 min	Tutti i giorni
Tendinite	70-90%	10 min	Locale
Infezione da streptococco	30-50%	15 min	Locale
Ferite ed escoriazioni	70-90%	15 min	locale




7. Esempi di battitura

7.1 Tendine flessore profondo 1

Tendine flessore profondo 1

Tendini e legamenti

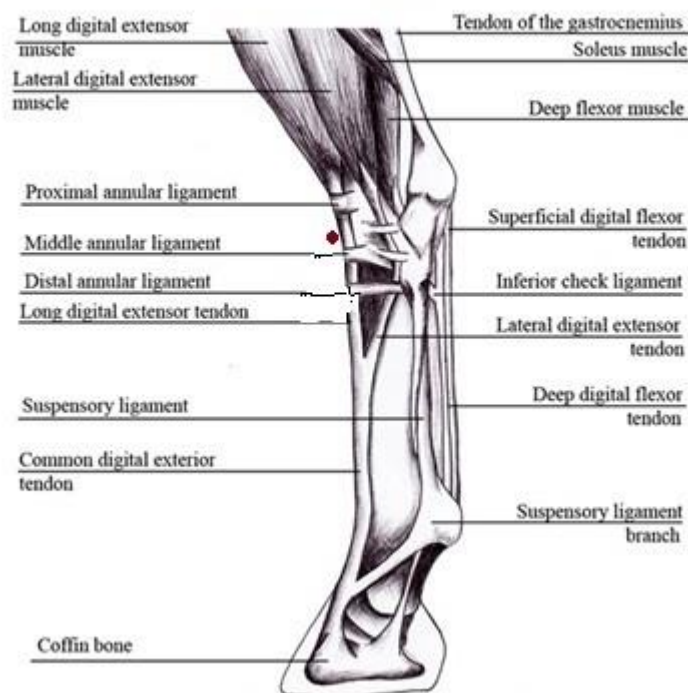

Quando si utilizza il cavo in questo modo, assicurarsi che il cavallo non calpesti il cavo stesso di trattamento. Non mettere la gamba del cavallo dentro il cavo.

7.2 Tendine flessore profondo 2

Tendine flessore profondo 2

Quando si utilizza il cavo in questo modo, assicurarsi sempre di poter togliere il cavo in modo che la gamba del cavallo non si impigli.

7.3 Tendine flessore superficiale

Tendine flessore superficiale

Applicare il cavo di trattamento in modo tale che il centro del cavo sia centrato sulla zona lesa.

Con tendine e lesioni muscolari inoltre è importante che il trattamento duri per 3-5 min. in modo che tendini e muscoli si rilassino per un veloce miglioramento muscolare.



7.4 Borsite del Carpale

Borsite carpale

In combinazione con unguenti un miglioramento può essere raggiunto anche più rapidamente. Applicare il prodotto prima dell'uso nelle aree interessate e trattare per 10 min.

7.5 Articolazione dello zoccolo

Per l'uso nella zona dell'articolazione dello zoccolo prestare particolare attenzione a posizionamento del cavo di trattamento.

Un calcio del cavallo può danneggiare l'isolamento del cavo stesso.

7.6 Legamento articolare

Entrambi i lati dovrebbero essere trattati per la stessa lunghezza di tempo. Idealmente 10 minuti ciascuno.

7.7 Articolazione del ginocchio

Articolazione del ginocchio.

Il cavo di trattamento dovrebbe coprire l'intera articolazione del ginocchio.

7.8 Garretto

Nel caso dell'infiammazione articolare, è generalmente efficace per trattare i relativi tendini e inserzioni muscolari per 5 min. Il rilassamento raggiunto aiuta nel processo di guarigione.

7.9 Articolazione temporo-mandibolare

In generale, iniziare con un'intensità inferiore sulla testa ed aumentarlo gradualmente.

7.10 Dorso cervicale

Dorso cervicale

Questo è applicato localmente. Possono essere trattate tutte le estremità colpite da tensioni muscolari.

7.11 Giunto sacroiliaco

Articolazione sacro-iliaca

Si prega di essere certi durante questo trattamento che il cavo di trattamento sia centrato sull'articolazione sacro-iliaca.